


D2 and D4 Sharps Container

HOW TO USE

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

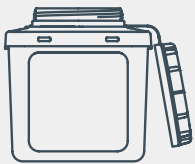


Open the container and position securely on a flat surface or into a secure mounted wall bracket.



Safely dispose of used sharps. If using an SED, this should be activated before disposal.



To prevent injury, do not overfill the container. Under no circumstances should sharps protrude above the designated container fill line.

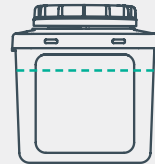

FILL LINE

The container is full once contents reach the fill line. When full, close and lock.

► **MAXIMUM GROSS MASS:** 1.2kg (D2) & 2.3kg (D4)



WWW.DANIELSHEALTH.CA | 888 952 5580

D2-ES
DO NOT FILL ABOVE THIS LEVEL.
NE REMPLISSER PAS AU-DESSUS DE CETTE LIGNE.NON REUSABLE
SINGLE USE ONLY
NON REUTILISABLE
UN SEUL USAGE

SHARPS / POINTUS

BIOHAZARD
DÉCHETS BIOMÉDICAUX

Daniels
MAKING HEALTHCARE SAFER

INSTRUCTIONS:
Deposit sharps point into this hole.
Do not force sharps into container.
To close, remove the Cap with "Click"
To Lock, rotate Cap with "Twist"
Caution: never use Cap with "Clicking"
Pour ouvrir, dévisser le Capotier du conteneur.
Déposer les objets pointus dans le trou.
Ne pas forcer les objets pointus dans le conteneur.
Pour fermer, retirez le Capotier jusqu'à entendre "Clic"
Pour verrouiller, tournez le Capotier jusqu'à entendre "Bruit"
Attention: ne pas utiliser le Capotier avec un "Clic"
Le conteneur ne peut pas être réouvert après avoir été verrouillé.

Batch No. E09-002

Mfg to CSA 2316-07 www.danielsinternational.com

D4-ES
DO NOT FILL ABOVE THIS LEVEL.
NE REMPLISSER PAS AU-DESSUS DE CETTE LIGNE.NON REUSABLE
SINGLE USE ONLY
NON REUTILISABLE
UN SEUL USAGE

SHARPS / POINTUS

BIOHAZARD
DÉCHETS BIOMÉDICAUX

Daniels
MAKING HEALTHCARE SAFER

INSTRUCTIONS:
Deposit sharps point into this hole. Do not force sharps into container. To close, remove the Cap with "Click"
To Lock, rotate Cap with "Twist"
Caution: never use Cap with "Clicking"
Pour ouvrir, dévisser le Capotier du conteneur.
Déposer les objets pointus dans le trou.
Ne pas forcer les objets pointus dans le conteneur.
Pour fermer, retirez le Capotier jusqu'à entendre "Clic"
Pour verrouiller, tournez le Capotier jusqu'à entendre "Bruit"
Attention: ne pas utiliser le Capotier avec un "Clic"
Le conteneur ne peut pas être réouvert après avoir été verrouillé.

Batch No. E16-003

Mfg to CSA 2316-07 www.danielsinternational.com