

# Boîte en carton

BOÎTE BRUNE – SAC ROUGE




**Daniels**

MAKING HEALTHCARE SAFER  
SOINS DE SANTÉ PLUS SÉCURITAIRES



1

Renverser la boîte et sceller les rabats du fond avec du ruban adhésif.

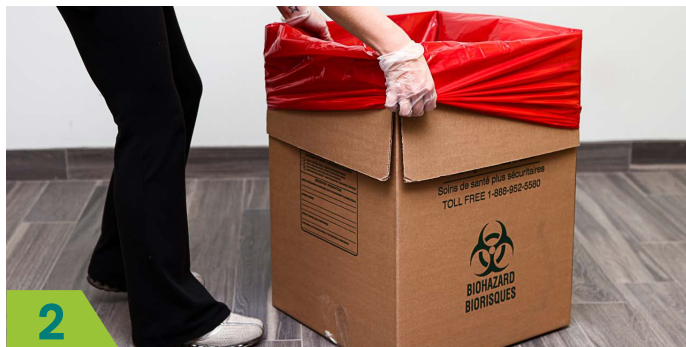

2

Mettre le sac à l'intérieur de la boîte en le repliant par-dessus les rabats. Remplir la boîte de déchets biomédicaux. **Il est interdit de jeter des objets tranchants ailleurs que dans les contenants pour objets tranchants.**



3

Fermer la boîte et mettre du ruban adhésif pour coller les rabats. Ranger sécuritairement dans la zone de collecte des déchets. **Une fois les rabats collés, le sac devrait être invisible.**



4

Pour sceller le sac, rassembler ses parois, les tordre, et faire un nœud simple.



5

Le cas échéant, apposer l'étiquette à code couleur de déchets à côté de l'étiquette du code à barres de Daniels.



6

Communiquez avec votre service local Daniels pour une cueillette de vos contenants.

## Petite boîte en carton

Dimensions : 35,6 cm x 35,6 cm x 53,3 cm (14 po x 14 po x 21 po)  
Poids max. : 16 kg (35 lb)

## Grosse boîte en carton

Dimensions : 45,7 cm x 45,7 cm x 61 cm (18 po x 18 po x 24 po)  
Poids max. : 23 kg (50,6 lb)

CAN181009