

# Boîte EcoSHIP

PAR FORMAT



MAKING HEALTHCARE SAFER  
SOINS DE SANTÉ PLUS SÉCURITAIRES



## CONFIGURATIONS

### Boîte moyenne

- 2 x contenants S14 ou
- 1 x contenant S14 et 1 x contenant S22 ou
- 2 x contenants S22

### Grande boîte


- 4 x contenants S14 ou
- 2 x contenants S32 ou
- 1 x contenant S32 et 1 x contenant S22 ou
- 1 x contenant S32 et 2 x contenants S14



1 Ouvrir la boîte EcoSHIP et distribuer les contenants à objets tranchants d'un bout à l'autre de l'établissement, aux endroits requis. **S'assurer que les documents et que la boîte vide sont rangés en lieu sûr.**



2 S'assurer que les rabats, à l'intérieur de la boîte EcoSHIP, sont relevés.

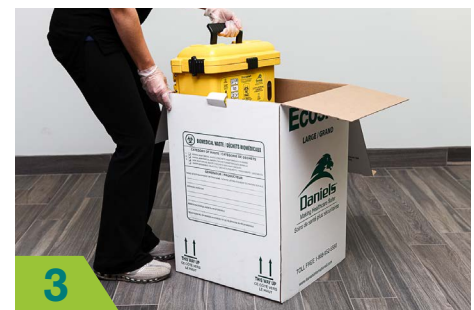

3 Mettre à la verticale les contenants à objets tranchants verrouillés dans la boîte EcoSHIP.



4 Pour fermer la boîte, refermer les rabats latéraux par-dessus les contenants à objets tranchants, replier le couvercle et l'insérer dans l'avant de la boîte. **S'assurer que la languette de sécurité est complètement insérée dans le couvercle.**



5 Le cas échéant, mettre le connaissance de retour dans l'enveloppe transparente. Si aucun connaissance de retour n'avait été fourni, communiquer avec Daniels pour qu'un connaissance soit envoyé par courriel ou par télécopieur.



6 Avant de déposer les contenants à objets tranchants verrouillés dans la boîte, s'assurer que les rabats intérieurs sont relevés. Cela permet de s'assurer que de la boîte ne se déplace pas pendant le transport.