

Emballage en seau



1

S'assurer que le seau ne contient que des déchets approuvés. Mettre le couvercle plat sur l'ouverture du seau. **S'assurer que le seau n'est pas trop rempli.**



2

Ne pas retirer le sceau d'inviolabilité.



3

Fermer le couvercle fermement. S'assurer qu'on ne voit aucun espace dans la bande d'étanchéité du couvercle. Continuer d'appliquer une pression jusqu'à ce que le couvercle soit complètement fermé.



4

Apposer l'étiquette blanche du code à barres Daniels sur le côté du seau.



5

Le cas échéant, apposer l'étiquette à code couleur de déchets à côté de l'étiquette du code à barres de Daniels.



6

Communiquez avec votre service local Daniels pour organiser la cueillette de votre seau.