




### OUVERTURE

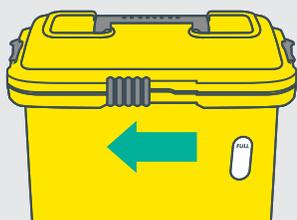

**1** Faites glisser le verrou avant vers la gauche

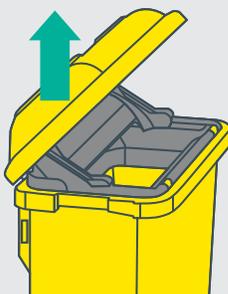

**2** Soulevez le couvercle à 45 degrés pour ouvrir partiellement l'accès

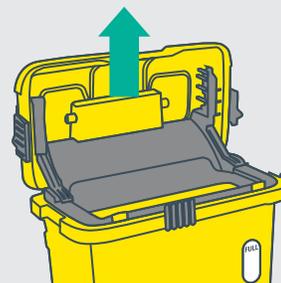


**3** Soulevez le couvercle à 90 degrés pour ouvrir complètement l'accès

### UTILISATION



Déposer les articles vers le bas dans l'ouverture.

### PLEIN

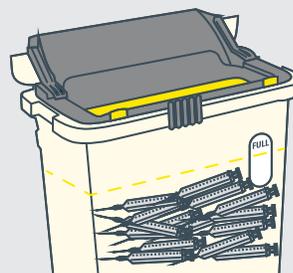

Lorsque les objets pointus et tranchants atteignent le niveau de remplissage, le contenant Access Plus est plein et doit être verrouillé et remplacé.

### FERMETURE




**1** Appuyez fermement sur le couvercle.



**2** Faites glisser complètement le verrou avant vers la droite.

### VERROUILLAGE

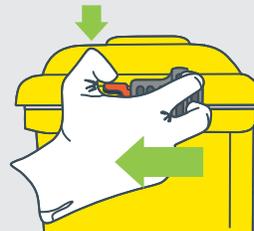

**1** Appuyez sur les languettes rouges.

**2** Faites glisser les verrous complètement vers l'avant.

**REMARQUE :**  
 Les verrous latéraux sont permanents!