


CT64 Chemosmart


ÉLIMINATION DES DÉCHETS CYTOTOXIQUES | MODE D'EMPLOI

POUR L'OUVRIR

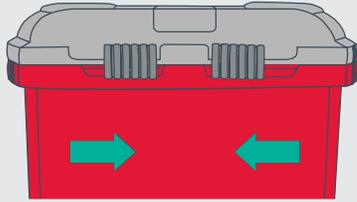


Faites glisser les deux verrous avant vers le centre.

UTILISATION

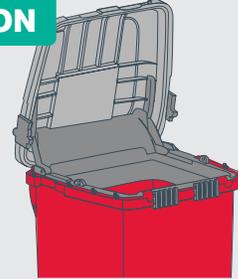


Ouvrez complètement le couvercle afin de déposer les déchets cytotoxiques. Lorsqu'utilisé avec l'accessoire de pédale, appuyez sur la pédale pour ouvrir le contenant.

PENDANT L'UTILISATION

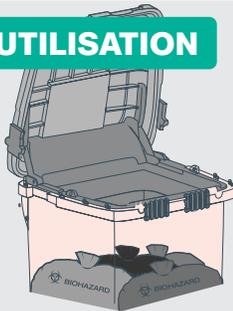


Remplissez-le uniquement avec des déchets cytotoxiques. Une fois rempli, le contenant doit être verrouillé de façon permanente et remplacé.

FERMETURE

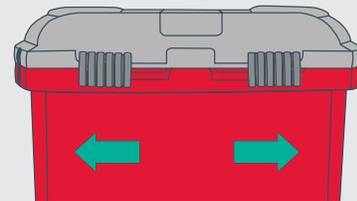


Faites glisser les deux verrous avant pour les éloigner l'un de l'autre.

VERROUILLAGE

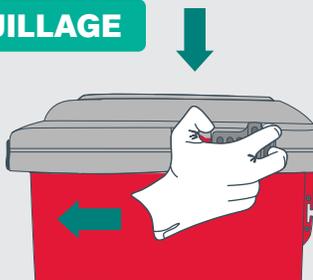

1 Appuyez sur la languette rouge et faites glisser les deux verrous latéraux complètement vers l'avant.

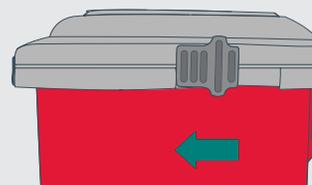

REMARQUE :
Les verrous latéraux sont permanents!

2 Les deux verrous latéraux doivent être dans une position complètement vers l'avant.

N'oubliez pas

AUCUN OBJET POINTU OU TRANCHANT EN VRAC ne doit être déposé dans ce contenant.

LAVEZ-VOUS TOUJOURS LES MAINS après avoir manipulé les déchets.

NE SURCHARGEZ PAS le poids brut maximal de 16 kg.

WWW.DANIELSHEALTH.CA