

# Soyez Sharpsmart

Assurez votre sécurité grâce à ces quatre instructions faciles à retenir.



**1**

**Ne mettez jamais vos mains dans un contenant**



**2**

**Ne mettez jamais d'objets pointus et tranchants dans des sacs ou des bacs à déchets ordinaires**



**3**


**Ne placez jamais de déchets ordinaires dans un contenant**




**4**

**Ne jetez jamais d'objets pointus et tranchants dans un contenant**


### OUVERTURE

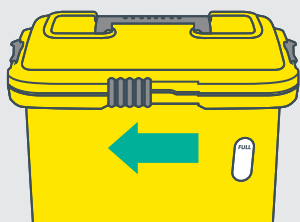

**1** Faites glisser le verrou avant vers la gauche


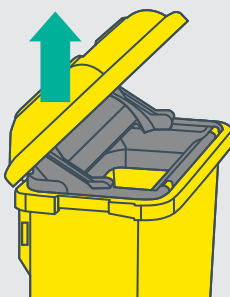


**2** Soulevez le couvercle à 45 degrés pour ouvrir partiellement l'accès

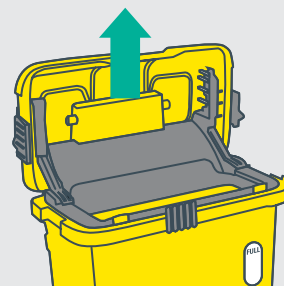


**3** Soulevez le couvercle à 90 degrés pour ouvrir complètement l'accès

### UTILISATION

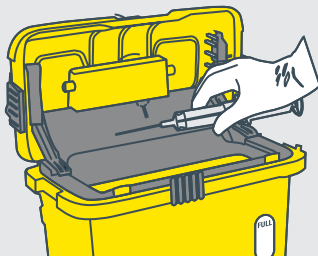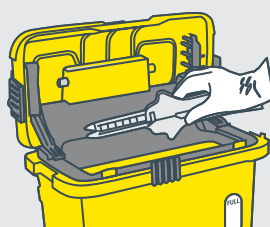


Déposer les articles vers le bas dans l'ouverture.

### PLEIN

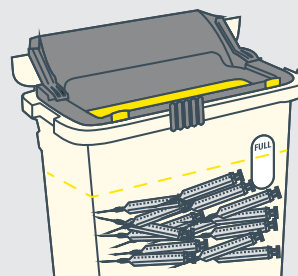


Lorsque les objets pointus et tranchants atteignent le niveau de remplissage, le contenant Access Plus est plein et doit être verrouillé et remplacé.

### FERMETURE

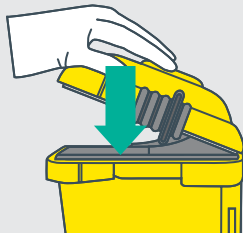


**1** Appuyez fermement sur le couvercle.

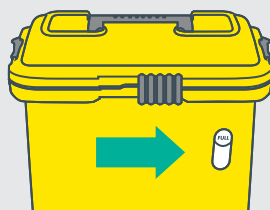

**2** Faites glisser complètement le verrou avant vers la droite.

### VERROUILLAGE

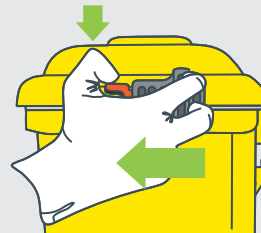


**1** Appuyez sur les languettes rouges.


**2** Faites glisser les verrous complètement vers l'avant.

**REMARQUE :**  
 Les verrous latéraux sont permanents!

### OUVERTURE

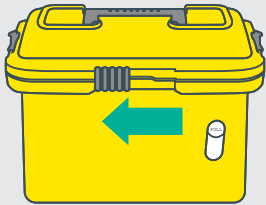


**1** Faites glisser le verrou avant vers la gauche.

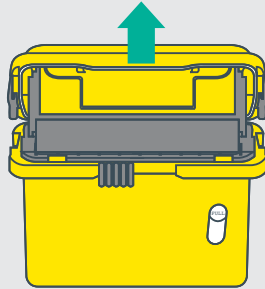


**2** Soulevez le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.

### SERINGUES

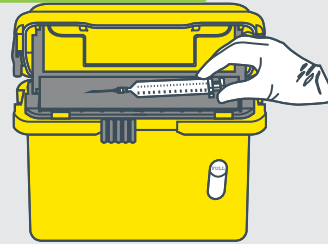


**1** Déposez les seringues à l'horizontale sur le plateau.

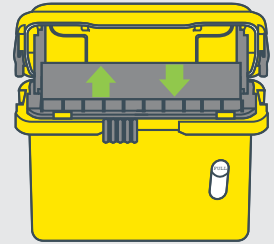


**2** Le plateau se vide de lui-même.

### OBJETS PEU POINTUS ET TRANCHANTS

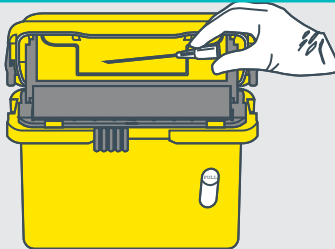


**1** Déposez l'objet pointu ou tranchant à l'horizontale sur le plateau.

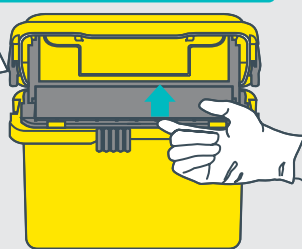

**2** Soulevez manuellement le plateau pour le vider.

### PLEIN

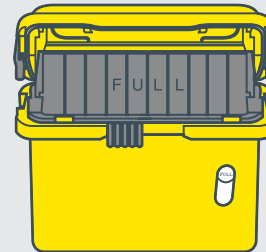

Lorsque le plateau reste à la verticale, verrouillez et remplacez le contenant.

### FERMETURE




**1** Appuyez sur les deux supports latéraux vers l'intérieur et fermez le couvercle.



**2** Faites glisser complètement le verrou avant vers la droite.

### VERROUILLAGE

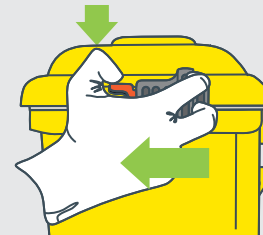

**1** Appuyez sur les languettes rouges.

**2** Faites glisser les verrous complètement vers l'avant.

**REMARQUE :**  
 Les verrous latéraux sont permanents!

#### N'oubliez pas

Ne mettez jamais vos mains dans un contenant pour objets pointus et tranchants. Fermez toujours le contenant avant de le déplacer ou de le retirer. Ne dégradez pas et n'écrivez pas sur le contenant. Jetez toujours les objets pointus et tranchants et les dispositifs de sécurité des objets pointus et tranchants dans les contenants pour objets pointus et tranchants.