

Bac Bio Bin — 106 L

BASE ET COUVERCLE GRIS | POIDS MAX. : 22 KG



1

Ouvrir le couvercle du contenant réutilisable à déchets biomédicaux.



2

S'il y a usage d'un sac interne, l'installer en le repliant par-dessus le haut du bac. Remplir le bac de déchets biomédicaux.



3

Si aucun sac interne n'est utilisé, remplir uniquement de déchets biomédicaux se trouvant dans des sacs noués/scellés.



4

Insérer uniquement les contenants remplis d'objets tranchants qui sont scellés et verrouillés sécuritairement.



5

Pour sceller le sac, rassembler ses parois, les tordre, et faire un nœud simple.



6

Fermer le couvercle et ranger sécuritairement dans la zone de collecte des déchets. **Une fois le couvercle refermé, le sac interne ne devrait pas dépasser.**



7

Apposer l'étiquette Daniels blanche munie du code à barres en haut à gauche, à l'avant du bac Bio Bin.



8

Communiquez avec votre service local Daniels pour une cueillette de vos contenants.