

# Boîte Ecoship

TOUS OBJETS À USAGE UNIQUE



1

Ouvrir la boîte Ecoship, s'assurer que les documents et que la boîte vide sont rangés en lieu sûr. Distribuer les contenants à objets tranchants d'un bout à l'autre de l'établissement; les utiliser jusqu'à ce qu'ils soient pleins.



2

Une fois que les contenants à objets tranchants sont pleins, veiller à ce qu'ils soient verrouillés.



3

Avant de déposer les contenants à objets tranchants verrouillés dans la boîte, s'assurer que les rabats intérieurs sont relevés. Cela permet de s'assurer que de la boîte ne se déplace pas pendant le transport.



4

Mettre à la verticale les contenants à objets tranchants verrouillés dans la boîte Ecoship.



5

Pour fermer la boîte, replier les rabats latéraux par-dessus les contenants à objets tranchants fermés.



5a

Refermer le couvercle et l'insérer dans l'avant de la boîte. **S'assurer que la languette de sécurité est complètement insérée dans le couvercle.**



6

Le cas échéant, mettre le connaissance de retour dans l'enveloppe transparente. Si aucun connaissance de retour n'avait été fourni, communiquer avec Daniels pour qu'un connaissance soit envoyé par courriel ou par télécopieur.



7

Communiquer avec Daniels en envoyant le formulaire de demande de service par courriel au centre de service Daniels local. Un camion de Daniels ou de Purolator viendra recueillir les déchets et laisser de nouvelles boîtes.