

Sharpsmart: Élimination correcte des objets tranchants

LES BLESSURES PAR AIGUILLE SONT PRÉVENABLES. PRIORISEZ LA SÉCURITÉ.



Les objets tranchants sont des objets ou dispositifs jetés capables de couper ou de pénétrer la peau. Ces objets comprennent :

- Aiguilles hypodermiques
- Kits intraveineux
- Pipettes de Pasteur
- Verre brisé
- Lames de scalpel
- Divers articles en plastique rigide tels que des perforateurs de membrane amniotique intacts et des pipettes en plastique cassées

Les éléments suivants NE DOIT PAS être éliminés dans ce conteneur :

- Gants
- Non-tranchants
- Emballage



POUR ÉVITER LES BLESSURES PAR AIGUILLE, IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS RECAPER OU DÉCOUPER LES AIGUILLES, ET LES POINTES INTRAVEINEUSES OU AIGUILLES NE DOIVENT PAS ÊTRE INSÉRÉES DANS DES TUBES EN PLASTIQUE ATTACHÉS. SOYEZ INTELLIGENT AVEC LES OBJETS TRANCHANTS, **ÉVITEZ LES ACTIONS QUI POURRAIENT METTRE VOTRE SÉCURITÉ EN DANGER.**



Le conteneur Sharpsmart est conçu pour se verrouiller automatiquement en position fermée lorsque le contenu atteint la ligne de remplissage maximum. Ce mécanisme de sécurité conçu est destiné à PROTÉGER les utilisateurs des blessures par aiguille qui peuvent survenir en raison d'un trop-plein et d'un blocage forcé du contenu.

Lorsque le plateau de sécurité Sharpsmart se verrouille par défaut en position 'PLEIN' :

- 1 Fermez le couvercle Sharpsmart et activez le verrou à glissière avant de le retirer du support.
- 2 Une fois retiré du support, les deux verrous latéraux doivent être engagés en position 'VERROUILLÉE'.
- 3 Remplacez le conteneur.