


# D2 et D4 Container de Déchets Ponctuels

## COMMENT UTILISER

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION

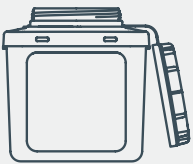

Ouvrez le conteneur et placez-le solidement sur une surface plane ou dans un support mural sécurisé.



Éliminez les objets tranchants usagés en toute sécurité. Si vous utilisez un dispositif de sécurité pour objets tranchants (DSOT), activez-le avant de procéder à l'élimination.



Pour éviter toute blessure, ne pas remplir le conteneur au-delà de la ligne de remplissage. En aucun cas les objets pointus ne doivent dépasser la ligne de remplissage désignée du conteneur.



LIGNE DE REMPLISSAGE

Le conteneur est plein lorsque les déchets atteignent la ligne de remplissage. Une fois plein, fermez-le et verrouillez-le.

► **MASSE BRUTE MAXIMALE:** 1.2kg (D2) & 2.3kg (D4)

