



À OUVRIR

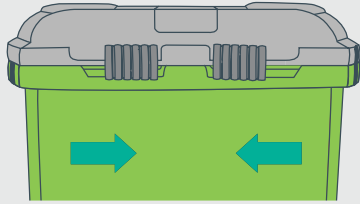


Faites glisser les deux verrous avant vers le centre.

USAGE

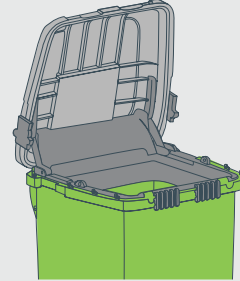


Ouvrez complètement le couvercle afin de déposer les déchets de dispositifs médicaux. Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec l'accessoire à pédale, appuyez sur la pédale pour ouvrir le collecteur.

EN USAGE

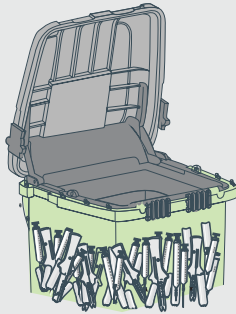


Remplissez avec des dispositifs médicaux. Une fois plein, le collecteur doit être verrouillé définitivement et remplacé.

FERMER

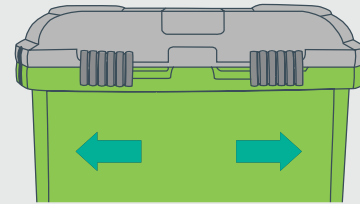


Faites glisser les deux verrous avant l'un loin de l'autre.

VERROUILLER

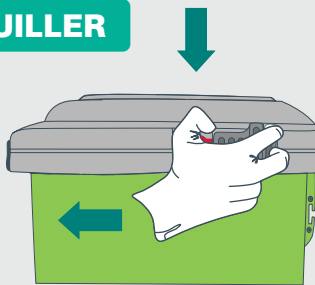

1 Enfoncez l'onglet rouge et faites glisser complètement les deux loquets latéraux vers l'avant.

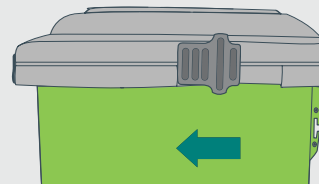

REMARQUE
Les verrous latéraux sont permanents!

2 Les deux verrous latéraux doivent être engagés en position complètement avancée.