

Sharpsmart


LA MISE AU REBUT APPROPRIÉE DES
OBJETS TRANCHANTS



AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES DUES À DES AIGUILLES, IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS REMETTRE LE CAPUCHON SUR L'AIGUILLE OU DE LA DÉTACHER ET DE NE PAS INSÉRER LES PERFORATEURS OU LES AIGUILLES D'ADMINISTRATIONS INTRAVEINEUSES DANS LA TUBULURE DE PLASTIQUE FIXÉE À CEUX-CI. **SOYEZ AFFÛTÉ, ÉVITEZ LES GESTES QUI POURRAIENT COMPROMETTRE VOTRE SÉCURITÉ.**

Les objets tranchants sont des objets ou des dispositifs mis au rebut qui peuvent couper ou pénétrer la peau:

- ▶ Aiguilles hypodermiques
- ▶ Ensembles d'administration intraveineuse
- ▶ D'administrations intraveineuses
- ▶ Verre brisé
- ▶ Lames de scalpel
- ▶ Divers articles en plastique dur, comme des perforateurs de membrane amniotique et des pipettes en plastique brisées

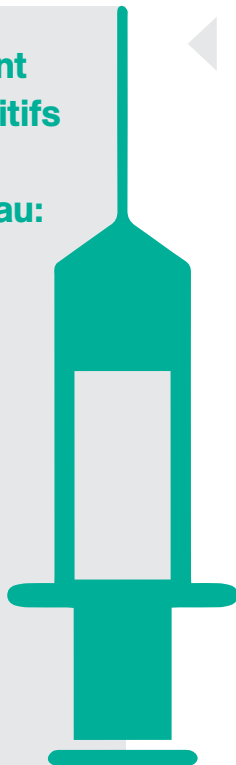

Les articles suivants NE doivent PAS être mis au rebut dans ce contenant:

- ▶ **GANTS**
- ▶ **OBJETS NON TRANCHANTS**
- ▶ **EMBALLAGES**



METTEZ TOUJOURS LES OBJETS TRANCHANTS ET LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR LES OBJETS TRANCHANTS AU REBUT DANS UN CONTENANT À OBJETS TRANCHANTS



FERMEZ TOUJOURS LE CONTENANT AVANT DE LE DÉPLACER OU DE L'ENLEVER



NE JETEZ JAMAIS LES OBJETS TRANCHANTS DANS LE CONTENANT



NE METTEZ JAMAIS VOTRE MAIN DANS LE CONTENANT À OBJETS TRANCHANTS

NOTEZ BIEN que les contenants réutilisables Sharpsmart de Daniels **NE** vont **PAS** dans les poubelles pour produits médicaux.


Daniels

MAKING HEALTHCARE SAFER
SOINS DE SANTÉ PLUS SÉCURITAIRES

OUVRIR




1 Glissez le dispositif de verrouillage avant vers la gauche.

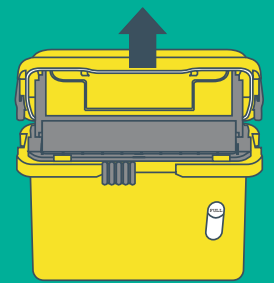


2 Soulevez le couvercle jusqu'à ce qu'il se bloque en position ouverte.

METTRE DES SERINGUES AU REBUT

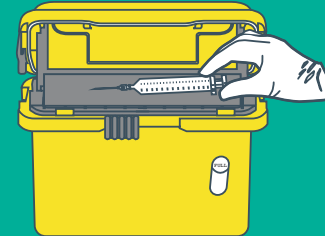


1 Déposez les seringues dans le plateau à l'horizontale.

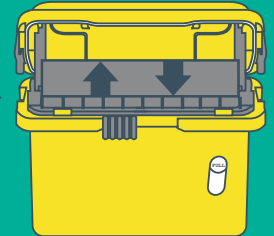

2 Le plateau se videra de lui-même.

METTRE DES OBJETS TRANCHANTS LÉGERS AU REBUT

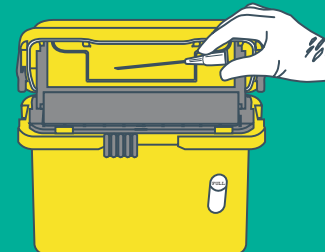


1 Déposez les seringues dans le plateau à l'horizontale.




2 Soulevez manuellement le plateau pour le vider.

PLEIN

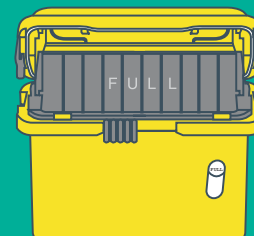

Lorsque le plateau reste à la verticale, le contenant est plein.

FERMER

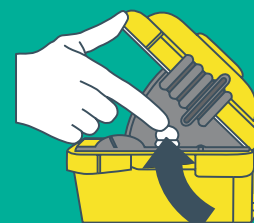

1 Appuyez sur les deux supports latéraux en poussant vers l'intérieur et fermer le couvercle.



2 Glissez le dispositif de verrouillage avant complètement vers la droite.

VERROUILLER



1 Appuyez sur les leviers rouges.

REMARQUE:
LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE LATÉRAUX SONT PERMANENTS!

2 Glissez les dispositifs de verrouillage complètement vers l'avant et remplacez le contenant.